



memodio herunterladen

**Anleitung für Apple Geräte
(iPhone/iPad)**


memodio herunterladen

Schritt 1:

Tippen Sie auf das blaue „App Store“-Symbol auf Ihrem iPhone und öffnen den App Store.



Schritt 2:

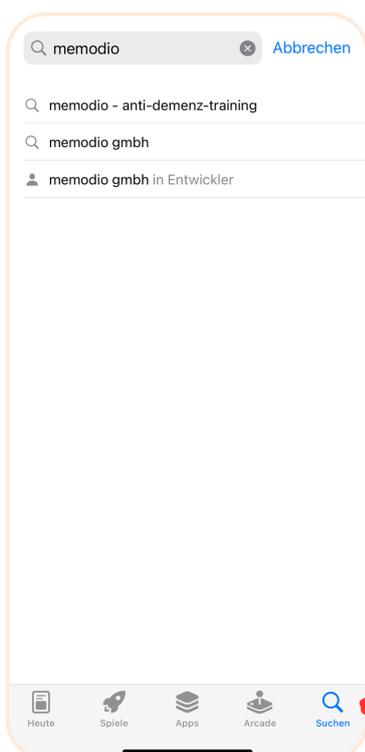


Unten rechts finden Sie das Symbol um die Suchleiste im App Store zu öffnen. Geben Sie „memodio“ ein und bestätigen die Suche. Die App „memodio - Anti-Demenz-Training“ sollte nun in den Suchergebnissen erscheinen.


memodio herunterladen

Schritt 3:

Tippen Sie auf das **“Laden”**-Symbol um die App herunterzuladen. Stellen Sie sicher, dass die App von der **memodio GmbH** (rot umkreist) stammt.

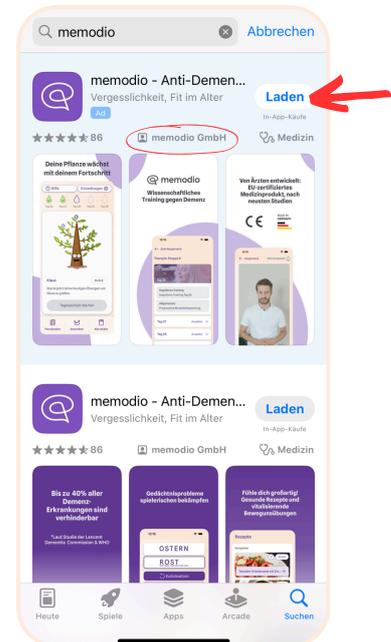

Schritt 4:

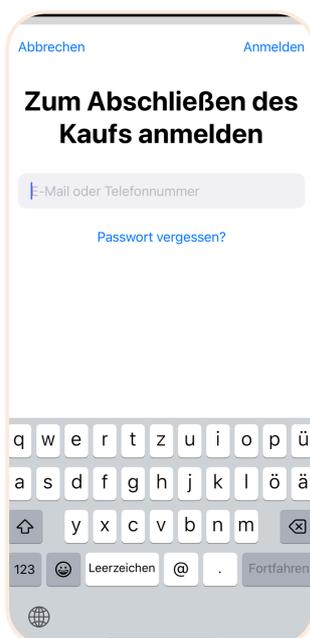


Sie werden dazu aufgefordert, sich mit Ihrer **Apple-ID** anzumelden. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie mit **„Fortfahren“**. Geben Sie dann Ihr Apple-ID-Passwort ein.

Auch wenn hier von **“Kauf”** die Rede ist: Das Herunterladen der App ist **kostenlos**. Sie müssen an dieser Stelle nichts bezahlen. Die ersten 5 Therapietage sind als Testphase kostenfrei. Es gibt keine automatischen Abonnements oder versteckten Kosten.

memodio herunterladen

Schritt 5:

Fast geschafft! Wenn Sie nun **“Installieren”** auswählen, startet der **Download** der App.

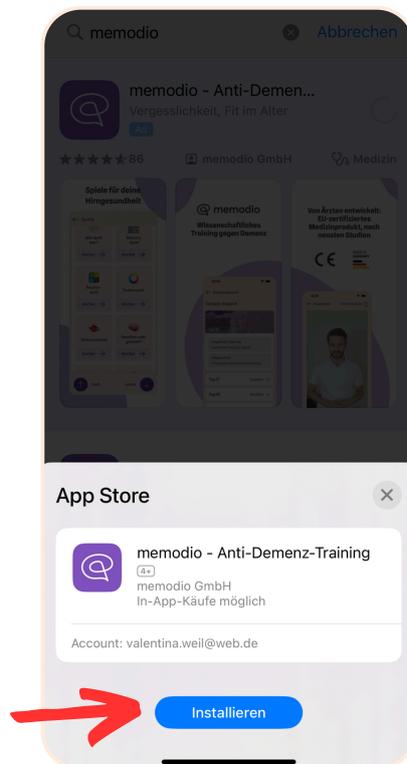

Schritt 6:



Die App ist nun installiert. Sie können sofort starten wenn Sie auf das **memodio-Symbol** tippen.

